

D-fend

KONDENZAČNÍ NÁDOBY

D-fendy umožňují vylepšený výkon nejnovějších respiračních modulů a jejich bezproblémový provoz. Jsou navrženy tak, aby chránily systém měření plynu respiračního modulu před kontaminací, vlhkostí a sekrecemi, které by mohly ovlivnit přesnost měření. Plyn, odebraný od pacienta, prochází přes membránu D-fendu, která zabraňuje bakteriím, virům, vodě a sekretům vniknout do modulu. Správná manipulace a výměna D-fendů je rozhodující pro ochranu senzorů uvnitř modulu a pro zajištění plynulého přesného monitorování plynu.

Sortiment D-fendů výrobce GE Healthcare jsou jediné validované pro použití s moduly GE.

Anestezie:

- M1182629
D-fend™ Pro šedý



- 876466-HEL
D-fend™ Ďerný



Intenzivní péče:

- M1200227
D-fend Pro+ zelený



- 881319-HEL
D-fend+ zelený



Jednorázové použití pro více pacientů.
Výměna nutná jakmile vyzve přístroj
nebo maximálně po 2 měsících.

Výměna u každého nového pacienta,
jakmile vyzve přístroj nebo
maximálně po 24 hodinách.

	E-sCO	E-sCOV	E-sCOVX	E-sCAiO	E-sCAiOV	E-sCAiOVX	E-sCAiOE	E-sCAiOVE	N-CAiO
D-fend Pro				X	X	X	X	X	X
D-fend Pro+	X	X	X						

	E-CO	E-COV	E-COVX	E-CAiO	E-CAiOV	E-CAiOVX
D-fend				X	X	X
D-fend+	X	X	X			

Modul E-MiniC:

- 8002174
Mini D-fend pro



U anestezie je výměna jakmile vyzve
přístroj nebo maximálně po 2 měsících.
V intenzivní péči vyměňte každých
24 hodin, u každého nového pacienta
nebo častěji, pokud to monitor požaduje

Účinnost filtrace:

D-Fend, D-Fend a Mini D-fend s filtrem GORE® Mikrofiltrační medical membrána

- účinnost bakteriální filtrace (BFE): > 99,99998%
- účinnost virové filtrace (VFE): 99,99997% - 99,99999%

D-Fend Pro a D-Fend Pro+ mají filtr PTFE oleofobní membránu

- účinnost bakteriální filtrace (BFE): > 99,99997070%
- účinnost virální filtrace (VFE): > 99,99993636%

D-fend

KONDENZAČNÍ NÁDOBY

objednáací číslo		popis produktu	množství
M1182629		D-fend Pro, šedá kondenzační nádoba, anestezie, moduly E-sCAiO, E-sCAiOV	10 ks/bal
876446-HEL		D-fend, černá kondenzační nádoba, anestezie, moduly E-CAiO, E-CAiOV, E-CAiOVX	10 ks/bal
M1200227		D-fend Pro+, zelená kondenzační nádoba, intenzivní péče, moduly E-sCO, E-sCOV	10 ks/bal
881319-HEL		D-fend+, zelená kondenzační nádoba, intenzivní péče, moduly E-CO, E-COV, E-COVX	10 ks/bal
8002174		D-fend Mini, kondenzační nádoba, anestezie+intenzivní péče, modul E-miniC	10 ks/bal
73318-HEL		Hadička vzorkovací, délka 2 m, bílá, M/M Luer, PVC/PE, jednorázová	10 ks/bal
73319-HEL		Hadička vzorkovací, délka 3 m, bílá, M/M Luer, PVC/PE, jednorázová	10 ks/bal
5514183		Hadička odvodu plynů, délka 0,18 m, bílá kónická a Colder, jednorázová	1 ks/bal

Výběr D-fend:

